

Antibeschlag Spray für medizinische Spiegel

Antibeschlagschutz für Mund-, Kehlkopf-, OP-Spiegel, intraorale Kameras, etc.

Produkt

Mundspiegel Antibeschlag Spray wurde entwickelt, um einen effektiven Beschlag- und Spritzwasserschutz für medizinische Spiegel aller Art zu gewährleisten.

Mundspiegel Antibeschlag Spray bildet eine hydrophile Eigenschaft, die dafür sorgt, dass bei Spritzwassereinsatz sich eine hauchdünne gleichmäßige Wasserschicht auf der Spiegeloberfläche bildet, die die lästige Tröpfchenbildung verhindert, welche große optische Verzerrungen verursacht. Dieser **Antibeschlag- und Spritzwasserschutz** bleibt selbst bei größeren Temperaturunterschieden und höchsten Anforderungen wie z. B. bei regelmäßig wiederholtem Anhauchen des Patienten gewährleistet.

Mundspiegel Antibeschlag Spray sorgt für eine saubere und schlierenfreie Oberfläche, die das Beschlagen der behandelten medizinischen Spiegel effektiv verhindert und zu keinen optischen Verzerrungen führt. Speziell beschichtete Spiegel sowie deren Griffe aus Metall oder Kunststoff werden nicht angegriffen. **Mundspiegel Antibeschlag Spray** ist in der Regel auch für speziell mit Metall beschichtete und veredelte (z. B. rhodiniert, chromatiert, etc.) Spiegeloberflächen bestens geeignet.

Mundspiegel Antibeschlag Spray ist zudem nicht brennbar, lösungsmittelfrei und völlig frei von Methylalkohol, Aceton, Butylglykol, Wachs, Ammoniak und Waschbenzin. **Mundspiegel Antibeschlag** ist zudem biologisch abbaubar, ungiftig, umweltfreundlich und PH-neutral. Dieses Produkt ist FCKW-frei und somit ozonfreundlich.

Dieses Medizinprodukt ist nicht schleimhautreizend! (Siehe CE Kennzeichnung).

Mundspiegel Antibeschlag Spray ist keimneutral und ist somit für den OP Einsatz geeignet. Selbst nach dem direkten Kontakt der behandelten Mundspiegel mit Schleimhaut und / oder Zahnfleisch wird die Antibeschlagwirkung nicht beeinträchtigt.

Anwendungsbereiche

Mundspiegel Antibeschlag Spray eignet sich hervorragend für die antibeschlagende Ausrüstung von klassischen und konventionellen Mund- und Dentalspiegeln im zahnmedizinischen Bereich, intraorale Kameras, Kehlkopfspiegel im HNO-Bereich, Operationsspiegel, usw.

Gebrauchsanweisung

Mundspiegel Antibeschlag Spray ist sehr einfach und schnell in der Anwendung:

Nach jedem Sterilisationsvorgang 2 Mal aufsprühen – in kreisenden Bewegungen mit einem sauberen und weichen Papiertuch kurz trocken reiben – leicht nachpolieren – FERTIG!

Bitte lediglich weiche Papiertücher und keine Tücher aus Baumwolle oder Mikrofaser benutzen!

Produkteigenschaften

Typ:	Flüssigkeit
Farbe:	Hellblau
Geruch:	Angenehm
PH-Wert:	Neutral
Relative Dichte:	1,0

Oben angegebene Werte gelten nicht als Produktspezifikation. Weitere Angaben finden Sie in unserem Sicherheits-Datenblatt. Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf Untersuchungen und in der Praxis erworbenen Erfahrungen und sind als Richtlinie gedacht. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Stand: November 2008